

GEBRUIKSAANWIJZING Voor

LT 00310



Voorbind injectietrainer


Belangrijk

Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en daarna goed op te bergen, zodat u hem op een later tijdstip kunt raadplegen.


Als u nog vragen heeft na het lezen van deze gebruiksaanwijzing, neem gerust contact met ons op.

Onderdelen


Het model wordt geleverd met de volgende onderdelen:

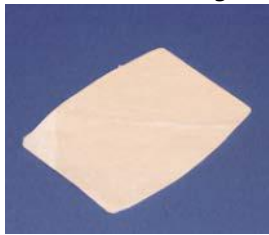


Opperhuid
LT00320 (per 2stuks)

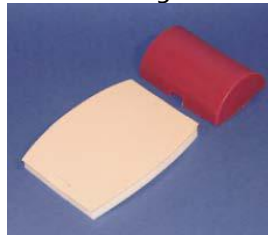


Huidkussen & spierblok LT00311

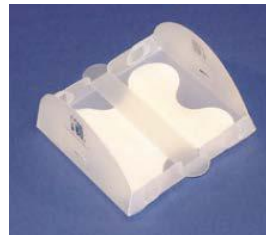

Tafelmodel met strip

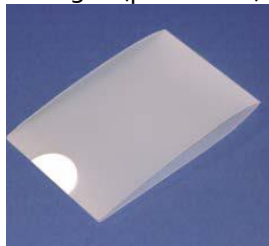

Beschermer van de opperhuid

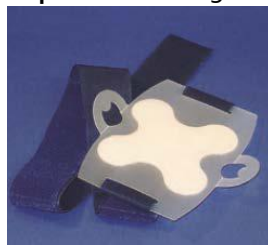

Om bind mechanisme

Aanvullende/ vervangbare onderdelen

De volgende onderdelen kunt u los bestellen met de vermelde artikelnummers.

Artikelnr.	Omschrijving	Per
LT00320	Opperhuid	2
LT00311/S	Huid voor de LT00310 voorbind injectietrainer	1
LT00311	Huidkussen, spierblok en spons	1

Handelingen

De volgende handelingen kunnen worden geoefend:

- ✚ Intracutaan injecteren
- ✚ Subcutaan injecteren (loodrecht techniek en huidplooiotechniek)
- ✚ Intramusculair injecteren

Gebruiksaanwijzing

- ✦ Voor het in gebruik nemen moet de injectietrainer 48 uur acclimatiseren op kamertemperatuur.
- ✦ De huid is zelfsluitend en laat weinig sporen na van de injectie, hierdoor is het fantoom langere tijd te gebruiken.
- ✦ Gebruik alleen water of aquadest als injectievloeistof en laat de injectietrainer **goed drogen** voordat deze wordt opgeruimd.
- ✦ Gebruik kleine hoeveelheden voor het injecteren bijvoorbeeld maximaal 2 ml per injectie.

LET OP! Om achteruitgang van de kwaliteit van het fantoom te voorkomen is het noodzakelijk dat het niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht, lage temperatuur of in een warme vochtige ruimte staat. Bewaar het fantoom daarom op een donkere plaats bij voorkeur in de bijgeleverde doos.

Tip: Als de huid vettig / plakkerig aanvoelt kan deze in gepoederd worden met talkpoeder.


Dit model kan als tafelmodel en als voorbindmodel gebruikt worden. Bevestig de onderlegger met het klittenband aan het tafelmodel d.m.v. de lipjes aan de zijkant.

Het model kan op iedere gewenste plaats worden voorgebonden met behulp van het klittenband.

Onderhoud

Na gebruik is het belangrijk om de injectietrainer uit elkaar te halen en alle afzonderlijke delen goed te drogen.

Maak voorzichtig aan één kant de strip los en haal het model uit elkaar. Nadat alles goed gedroogd is kan het model weer in elkaar worden gezet.

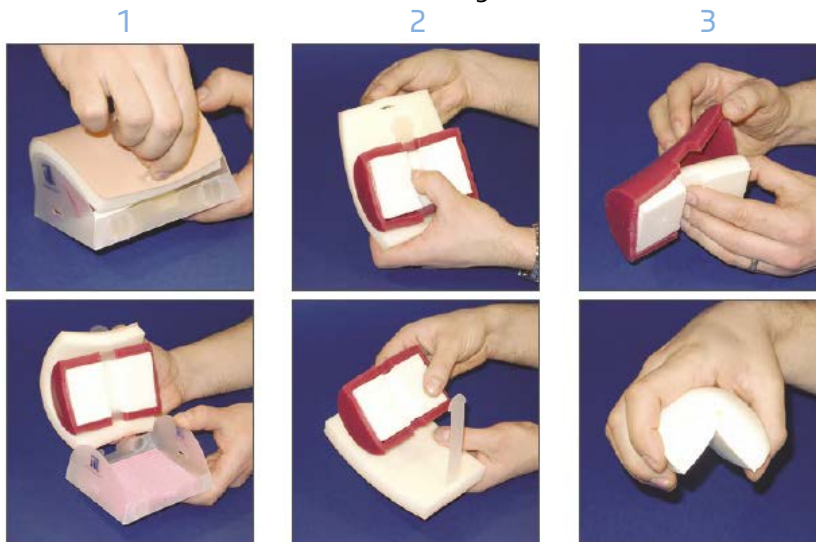

Vorbereidingen

LET OP! Deze handelingen zijn alleen nodig als er geïnjecterd gaat worden voor **Intracutane** injectie.

Haal de opperhuid uit de beschermhoes en verwijder het papier aan de glanzende kant. Rol de opperhuid met de glanzende kant voorzichtig over de injectietrainer.

Verwijder daarna het papier aan de matte kant. De injectietrainer is nu klaar voor het gebruik van intracutane injecties.

Door de huid op te lichten zie je of er goed geïnjecteerd is. De druppel kan worden verwijderd. Trek de huid daarna weer strak zodat de luchtballen verdwijnen.

